
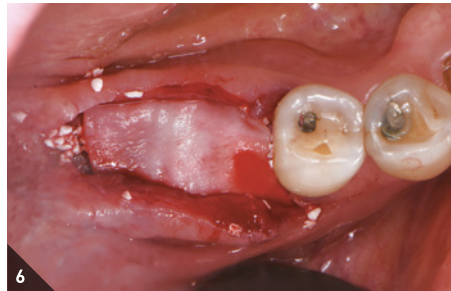


ГОРИЗОНТАЛЬНА АУГМЕНТАЦІЯ АЛЬВЕОЛЯРНОГО ПАРОСТКУ

Yong-Gun Kim, DDS, PhD

Dept. of Periodontology at Kyungpook Uni. | Korea

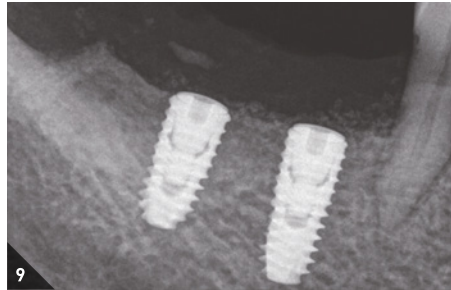

Хірургічна ділянка	Лікування	Додаткові засоби	Техніка
№45-47	Кісткозамінний матеріал Bontree Plus, гранули	Резорбована колагенова мембрана	Керована регенерація тканин
 1	 2	 3	Передопераційний рентгенографічний знімок. Втрата кісткової тканини поширюється до дистального кореня зуба №45 Внутрішньоротовий знімок після видалення Значна дегісценція та двобічний дефект кісткової тканини, що спостерігаються на дистальному корені зуба №45
 4	 5	 6	Встановлення імплантатів №46,47 з використанням кісткозамінного матеріалу Bontree Plus Розміщення колагенової мембрани Внутрішньоротовий знімок після розміщення колагенової мембрани
 7	 8	 9	Внутрішньоротовий знімок через 3 місяці після втручання. Належне загоєння Внутрішньоротовий знімок через 3 місяці після втручання Рентгенографічне зображення через 3 місяці після втручання

Тип	Вага	Об'єм	Вартість, \$
МАЛЕНЬКІ гранули			
0.30 ~ 0.50 мм	0.15 г	0.30 куб.см	29
	0.25 г	0.50 куб.см	44
	0.50 г	1.0 куб.см	74
	1.0 г	2.0 куб.см	114
СЕРЕДНІ гранули			
0.50 ~ 0.85 мм	0.15 г	0.30 куб.см	29
	0.25 г	0.50 куб.см	44
	0.50 г	1.0 куб.см	74
	1.0 г	2.0 куб.см	114
ВЕЛИКІ гранули			
1.00 ~ 1.40 мм	0.15 г	0.30 куб.см	29
	0.25 г	0.50 куб.см	44
	0.50 г	1.0 куб.см	74
	1.0 г	2.0 куб.см	114
ПАСТА шприц			
0.50 ~ 0.85 мм	0.15 г	0.30 куб.см	45
	0.25 г	0.50 куб.см	55
	0.50 г	1.0 куб.см	89