
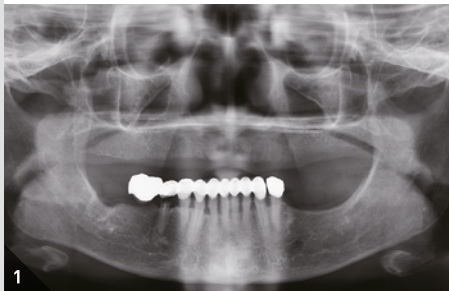
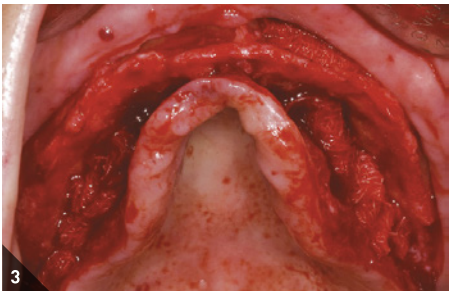
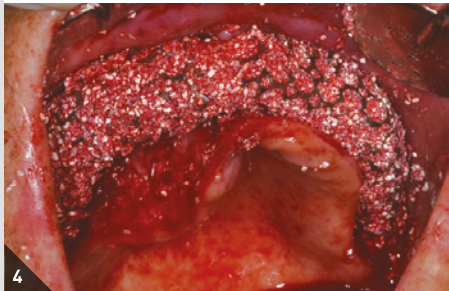
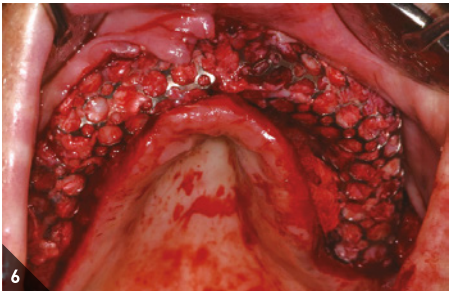
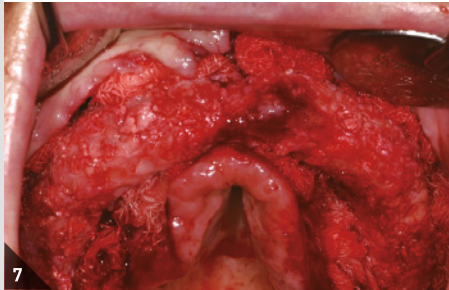


КОМПЛЕКСНЕ НАРОЩУВАННЯ КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ

Won-Pyo Lee, DDS, PhD

Dept. of Periodontology at Chosun Uni. | Korea

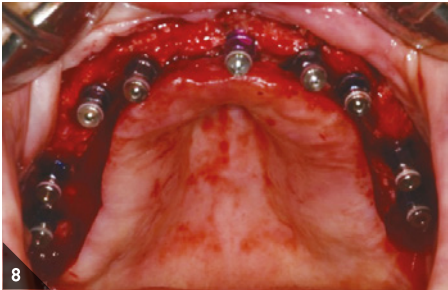

Хірургічна ділянка	Лікування	Додаткові засоби	Техніка
№17-27	*Кісткозамінний матеріал Bontree Plus, гранули, 50% Кісткозамінний матеріал тваринного походження, 50%	Титанова сітка Резорбована колагенова мембрана Нейлон 5-0	Нарощування альвеолярного гребня
			
Передопераційний панорамний знімок	Передопераційний внутрішньоротовий знімок	Підняття клаптя повної арки верхньої щелепи. Розріз лезом 15 с, підняття клаптя хірургічною кюреткою Molt 2/4	
			
Встановлення титанової сітки з подальшим використанням кісткозамінного матеріалу Bontree Plus (2.0г) та кісткозамінного матеріалу тваринного походження (2.0г)	Вертикальне ушивання м'яких тканин після кісткової пластики	Вигляд через 6 місяців після втручання. Підняття лоскуту для видалення титанової сітки	
			
Видалення титанової сітки та підтвердження належного об'єму кістки	Встановлення імплантатів	Панорамний рентгенографічний знімок після фінальної реставрації	

Тип	Вага	Об'єм	Вартість, \$
МАЛЕНЬКІ гранули			
0.30 ~ 0.50 мм	0.15 г	0.30 куб.см	29
	0.25 г	0.50 куб.см	44
	0.50 г	1.0 куб.см	74
	1.0 г	2.0 куб.см	114
СЕРЕДНІ гранули			
0.50 ~ 0.85 мм	0.15 г	0.30 куб.см	29
	0.25 г	0.50 куб.см	44
	0.50 г	1.0 куб.см	74
	1.0 г	2.0 куб.см	114
ВЕЛИКІ гранули			
1.00 ~ 1.40 мм	0.15 г	0.30 куб.см	29
	0.25 г	0.50 куб.см	44
	0.50 г	1.0 куб.см	74
	1.0 г	2.0 куб.см	114
ПАСТА шприц			
0.50 ~ 0.85 мм	0.15 г	0.30 куб.см	45
	0.25 г	0.50 куб.см	55
	0.50 г	1.0 куб.см	89